

KFBIO 扫描仪操作指南

1. **启动扫描仪：**打开机器总电源和电脑
2. **开启扫描控制 PC：**打开扫描控制软件，等待机器初始化结束
3. **放入切片：**软件执行弹出操作；打开外门；放入切片托盘；关闭外门
4. **扫描操作：**加入扫描对象；点击预览；点击区域识别、焦点识别；扫描切片
5. **阅片：**扫描结束后，点击界面浏览按钮进行阅片
6. **弹出切片：**点击弹出，等待切片归位，开外门取出切片，关闭外门
7. **关机：**先关软件，再关仪器和电脑

注意事项：

1. 设备所使用电源插座必须接地
2. 不得擅自搬运设备，不得随意拆卸装备
3. 保持设备室内温度在 10-30℃ 之间
4. 扫描仪工作站不能随意安装工作以外的软件包括杀毒软件等
5. 维护保养设备时务必断电
6. 设备初始化或者运转时，切勿打开设备切片槽门
7. 扫描仪电脑、扫描仪需要定期关机，防止因为电脑长期开机出现设备报错
8. 尽量保持切片背景干净
9. 组织上面不要有过多胶水，沾染胶水的组织不要选取进行扫描
10. 放切片时，把切片放平并保持切片表明干净

维护与保养：

1. 使用完毕设备需套上防尘罩
2. 物镜、棱镜每 3 个月清理一次灰尘